



**BIOCLINIC**

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

Examen	CREATININA (ORINA AISLADA)
Días para toma de muestras	LUNES A SABADO
Instructivo de toma de muestra para paciente	Lávese las manos Humedezca dos motas de algodón con agua y una mota con jabón neutro si se cuenta. Lávese los genitales. HOMBRES: Abra el frasco, sin tocar los bordes, retraiga el prepucio (piel que cubre el pene) y manténgalo así durante todo el procedimiento. MUJERES: Abra el frasco, sin tocar los bordes. Separe los labios mayores (genitales externos) con una de sus manos y manténgalos así. Luego comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del baño. Luego, continúe orinando (segundo chorro) directamente en el frasco llenándolo hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y tapar. Evite contaminar la muestra y/o derramarla , sin tocar el frasco ni la tapa por la cara interior.
Días entrega de resultados	24 HRS
Instructivo de Preparación del paciente	Idealmente obtener la primera orina de la mañana de segundo chorro. Se debe tomar la muestra siempre previo aseo genital, con un volumen mínimo de 10 ml. de recolección. Se sugiere no estar en terapia con antibiótico.
Instrucctivo de traslado	Mantener la muestra refrigerada y trasladar a laboratorio Bioclinic antes de 1 horas de emitida, Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y ciérrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo y ciérrela.